

Sacs vomitoires Vomipack - Le lot de 25



Les sacs vomitoires ou sacs Vomix sont **d'une utilisation simple pour recevoir les urines et les vomissements**. Très utiles en ambulance, en voiture, en avion, en bus en bateau ou à la maison, ils **se glissent aisément dans un sac et vous accompagnent partout**. Dispositif médical non stérile à usage unique. Dimensions 15.5 cm x 36 cm. Valve anti-retour graduée et volume de 1 L.

Référence 558545

Attributs du produit :

Description du produit :

Instructions d'utilisation des Sacs vomitoires Vomipack

- Après avoir sorti le sac de son sachet, ramener les extrémités du cône vers le centre. Un entonnoir est ainsi formé.
- Evacuer dans le cône (vomissement ou urine)
- Afin de fermer le sac, il suffit de rabattre les rebords du cône en suivant la courbe préalablement marquée.
- Vous êtes tranquille. Tout risque de renversement est écarté puisque la valve intérieure se reforme automatiquement après utilisation.

Conditionnement: Vomipack par 25 unités

Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: VOMIBAG **Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle et étiquetage avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Normes applicables au dispositif médical:** Dispositif médical Non Stérile. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.