

Surfanios Premium - Désinfectant sols et surfaces - Bidon de 5 litres + pompe



Livré avec sa pompe. PRODUIT À DILUER 20 ml > 8 L (1 coup de pompe). Grâce à son action détergente et désinfectante en une opération simultanée, Surfanios Premium est idéal pour le nettoyage des sols, surfaces et matériel en milieu médical. Propriétés virucide, bactéricide, levuricide, fongicide. Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Usage réservé aux professionnels*.

Référence 555060 + 555080

Attributs du produit :

Description du produit:

*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.

Atouts et caractéristiques de Surfanios Premium - Désinfectant sols et surfaces - Bidon de 5 litres

- Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée
- Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier
- Produit formulé sans aldéhyde Optimisation des données écotoxicologiques
- Solution de couleur verte pH du produit pur : 11,2 pH du produit dilué (0,25%) : environ 8 Densité : 1,007 Indice de Réfraction : 1,3587

Mode d'emploi de Surfanios Premium - Désinfectant sols et surfaces - Bidon de 5 litres

- Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. Dilution à 0,25% : Verser une dose de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM dans le seau de lavage.
- Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Le rinçage est inutile sauf si les zones à traiter sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires
- Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.
- Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

Propriétés microbiologiques de Surfanios Premium - Désinfectant sols et surfaces - Bidon de 5 litres

- Bactéricide en 5 min, 0,25 %, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, BMR (EN 1276).
- **Tuberculicide** en 120 min, 0,25 %, 20°C ou 60 min, 0,5%, 20°C (EN 14563).
- Levuricide en 15 min, 0,25 %, 20°C (EN 1275, EN 1650).
- Fongicide en 120 min, 0,25 %, 20°C (EN 1275, EN 1650).
- Virucide en 5 mn, selon EN 14476 HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle HCV) et Herpès



virus

Dangereux – respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) et dispositif médical de classe lla - usage usage réservé aux professionnels.

Conditionnement: Bidon de 5 litres avec pompe

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Nom du produit: SURFANIOS PREMIUM

Utilisation et instructions: Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet

"Documentation"

Fabricant: Laboratoires ANIOS

Marquage CE: Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830