

Aniospray Surf 29 - Désinfectant à pulvériser - Bidon de 5 litres



Aniospray Surf 29 est un désinfectant rapide **prêt à l'emploi** qui peut être utilisé en bloc opératoire, dans les services à hauts risques, en salle d'examen, en services de soins. **Désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés** (stéthoscopes, câbles, testeurs de glycémie ...).

Usage réservé aux professionnels. Produit soumis à formation au Certificat individuel pour utiliser à titre professionnel et distribuer certains types de produits biocides catégorie désinfectants*.

Référence 556062

Attributs du produit :

Description du produit :

****Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.***

Les atouts et caractéristiques de Aniospray Surf 29 - Désinfectant à pulvériser - Bidon de 5 litres

- Formulé sans aldéhyde, sans colorant ni substance parfumante
- Large spectre antimicrobien (B.K., HIV-1, HBV et Rotavirus)
- **Large compatibilité avec tout type de matériaux et dispositifs médicaux**
- Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation Référencé dans la Liste positive S.F.H.H.
- Produit prêt à l'emploi. Solution limpide incolore.
- pH à +20°C : env. 5,5. Pourcentage d'éthanol : 29% v/v. Point d'éclair : +33°C.
- Produit testé selon APAVE. **Utilisable dans les pulvérisations manuels ou à pression préalable.**

Propriétés microbiologiques de Aniospray Surf 29 - Désinfectant à pulvériser - Bidon de 5 litres

- Actif sur Bactéries: EN 1040, EN 1276 SARM (EN 13727) NF T 72-171 - 5 minutes
- Actif sur Mycobactéries: M. tuberculosis (B.K.) - 5 minutes
- Actif sur Levures: EN 1275 (C.albicans) - 5 minutes
- Actif sur Moisissures: T 72-301 (A. niger, A. fumigatus) - 15 minutes
- Actif sur Virus: HIV-1, HBV, BVDV (virus-modèle HCV) Influenzavirus (HN , HN) Rotavirus - 15 minutes

Mode d'emploi de Aniospray Surf 29 - Désinfectant à pulvériser - Bidon de 5 litres - Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type SURFANIOS. - Pulvériser un film uniforme sur les surfaces verticales puis le mobilier, du fond de la pièce, jusqu'à la sortie - Laisser la pièce fermée (porte et fenêtres) pendant 15 minutes minimum il est préférable d'attendre 30 minutes et d'aérer si possible avant réutilisation).

Inflammable - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 9/45/CE et ses adaptations)

Stockage entre +5°C et +25°C. Usage réservé aux professionnels.

Conditionnement: Bidon de 5 litres **Normes - Classification - Mentions obligatoires** **Nom du produit:** ANIOSPRAY SURF 29 **Utilisation et instructions:** Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. **Onglet "Documentation"** **Fabricant:** Laboratoires ANIOS **Marquage CE:** Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830