

## Compresse grasse stérile - MEDITULLE - 10 x 10 cm - La boîte de 10



Ce pansement **non allergisant et neutre** est indiqué pour **traiter des plaies ouvertes, principalement suite à des brûlures**. La compresse MEDITULLE n'adhère pas à la plaie, elle est idéale dans le traitement des brûlures et des plaies dues aux brûlures. Elle ne colle pas à la plaie. Elle protège contre l'infection, est douce et permet le passage des exsudats. Elle s'adapte à la plaie et résiste à l'effilochage. Elle est composée d'un support en gaze de coton, d'une base émolliente (vaseline blanche hydrophobe : paraffine) et d'un film transparent. **Dimensions: 10 x10 cm, emballage individuel stérile. Conditionnement en boîte de 10.**

Référence 557624E X 10

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

- Elle ne colle pas à la plaie.
- Pansement idéal pour soulager les petites brûlures .
- Pansement sous emballage stérile (Rayonnement Gamma)
- Dimensions du pansement: 10 x 10 cm

#### Mode d'emploi de la Compresse grasse stérile - MEDITULLE - 10 x 10 cm - La boîte de 10

- 1- Après un nettoyage des blessures ou une désinfection de la plaie, les compresses Meditulle® devront, dans des conditions aseptiques, être disposées sur la blessure à 1 cm de la plaie, en chevauchant celle-ci.
- 2- Selon le degré d'exsudat de la plaie, un pansement très ou modérément absorbant doit être disposé sur la compresse de vaseline.
- 3- Le temps de présence du pansement sur la plaie dépend de l'indication du médecin et de la situation, de sorte que la paraffine (vaseline) soit généralement absorbée dans les 1 à 3 jours.
- 4- L'application d'un pansement occlusif doit être évitée en cas d'infection pour ne pas masquer une éventuelle détérioration de la plaie.

**Conditionnement:** Pansement 10 x 10 cm vendu en boîte de 10 unités **Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Désignation:** Compresse grasse stérile - MEDITULLE

**Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle et étiquette avant utilisation - Consultez un médecin ou un

professionnel de santé en cas de doute.

**Fabricant:** EUROMEDIS

**Normes applicables au dispositif médical:** Dispositif de classe IIb Stérile. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

*Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes.*