

Lave oeil Plum 0.9% Chlorure de Sodium - Corps étranger - Flacon de 500 ml



Solution stérile de chlorure de sodium pour un premier-soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux. En cas d'urgence, un lavage efficace des yeux ou de la peau sont garantis en quelques secondes seulement. Flacon de 500 ml.

Référence 557570

Attributs du produit :

Description du produit :

Principales caractéristiques du Lave œil Plum 0.9% Chlorure de Sodium – Corps étranger – Flacon de 500

- Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % : similaire aux sécrétions de l'œil humain
- Lave-œil efficace pour rincer les corps étrangers tels que les impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants
- Utilisation facile
- Œillères ergonomiques qui assurent un flux de liquide efficace
- Design pratique pour une ouverture rapide et simple des flacons
- Les flacons sont à usage unique et ne peuvent pas être réutilisés
- Les flacons portent le marquage CE et ont une durée de conservation de 3,5 ans

Utilisation du Lave œil Plum 0.9% Chlorure de Sodium - Corps étranger - Flacon de 500 ml

- Dévisser l'oeillère jusqu'à casser l'opercule.
- Tête en arrière, vous pouvez rinçer.
- Une fois rincé et pour éviter de vous mouiller, vous pouvez pencher la tête en avant.

Conditionnement: Flacon de 500 ml

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Lave oeil Plum 0.9% Chlorure de Sodium - Corps étranger - Flacon de 500 ml

Fabricant: Plum

Utilisation et instructions: Lire mode d'emploi avant utilisation - Consultez un médecin ou un

professionnel de santé en cas de doute.

Normes applicables au dispositif médical: Dispositif médical de classe I. Produit de santé réglementé qui

porte à ce titre le marquage CE.

