

Anios Surfa'Safe Premium - Mousse désinfectante de surfaces - Spray de 750 ml



Prêt à l'emploi. **Ce détergent désinfectant est destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables** (sondes échographiques, cables et connectiques....) et des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...). Actif sur Virus Selon EN 14476.

Usage réservé aux professionnels. Produit soumis à formation au Certificat individuel pour utiliser à titre professionnel et distribuer certains types de produits biocides catégorie désinfectants*.

Référence 553012

Attributs du produit :

Description du produit :

****Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.***

Les atouts et caractéristiques de Anios Surfa'Safe Premium - Mousse désinfectante de surfaces - Spray de 750 ml

- Concept breveté. Parfum frais. Formulé sans alcool
- Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus... dès 3 min
- Mousse compacte évitant tout surplus de produit
- Nettoyant et désinfectant en 1 seule opération. Sans substance CMR, sans alcool, sans parfum ni colorant
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé)
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas ...)
- Séchage des surfaces rapide et sans trace • Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, suivi d'un rinçage
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de GES* de 7% par rapport à un produit de même application • pH : 6 +/- 0.5

Mode d'emploi de Anios Surfa'Safe Premium - Mousse désinfectante de surfaces - Spray de 750 ml

- **Appliquer** la mousse détergente désinfectante sur la zone à traiter ou de préférence sur un non-tissé.
- **Répartir** la mousse sur la zone à traiter.
- **Laisser sécher.** Ne pas rincer (sauf si la surface est susceptible d'être en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses). Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne

recherchée.

Propriétés microbiologiques de Anios Surfa'Safe Premium - Mousse désinfectante de surfaces - Spray de 750 ml

- **Actif sur Bactéries** EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 EN 13727 sur BMR et BHR EN 13697 sur BMR et BHR 3 minutes 1 minute 2 minutes
- **Actif sur Levures** EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 15 minutes
- **Actif sur Moisissures** EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 20 minutes
- **Actif sur Virus** Selon EN 14476 : Rotavirus Selon EN 14476 : Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus* Selon EN 14476 : Polyomavirus SV40 Selon EN 14476 : Norovirus 30 secondes 1 minute 5 minutes 30 minutes

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) - usage réservé aux professionnels. Dispositif médical de la classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée). Conditionnement: Spray de 750 ml

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Nom du produit: SURFA'SAFE PREMIUM

Utilisation et instructions: Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. **Onglet "Documentation"**

Fabricant: Laboratoires ANIOS

Marquage CE: Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830