

## Lingettes détergentes aseptisantes WIP'ANIOS EXCEL - Sachet de 50



Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante. **Traitement des surfaces** (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), **des dispositifs médicaux** non immergeables et non invasifs. Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes. **Lingettes actives sur Virus selon EN14476.**

**Usage réservé aux professionnels. Produit soumis à formation au Certificat individuel pour utiliser à titre professionnel et distribuer certains types de produits biocides catégorie désinfectants\*.**

Référence 555012

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

*\*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

#### Atouts, caractéristiques et composition des Lingettes détergentes aseptisantes WIP'ANIOS EXCEL - Sachet de 50

- Lingettes en viscose 100% biodégradable • Solution d'imprégnation : Formulée sans parfum, sans alcool
- Large spectre virucide • Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes • Haute compatibilité avec les matériaux
- Multi-usage : Dispositif médical class IIb et biocide TP2 et TP4 • WIP'ANIOS EXCEL 60 est idéal pour les grandes surfaces
- Composition : 100% viscose (spunlace 50gr/m<sup>2</sup>).
- Solution d'imprégnation : **5 ml de SURFA'SFE par lingette.**
- Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients

#### Mode d'emploi des Lingettes détergentes aseptisantes WIP'ANIOS EXCEL - Sachet de 50

- Prendre une lingette et **bien refermer le dévidoir.**
- Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.
- Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si les zones à traiter entrent en contact avec la peau ou les muqueuses.
- Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d'hygiène en place. Bien refermer

l'emballage après chaque ouverture.

**Propriétés microbiologiques des Lingettes détergentes aseptisantes WIP'ANIOS EXCEL - Sachet de 50**

**- Actif sur bactéries:** EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 EN 13727 sur ERV, A. baumannii ?LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM EN 13697 sur ERV, A. baumannii ?LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM- **Actif sur levure:** EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562- **Actif sur moisissures:** EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562- **Actif sur virus:** EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus Polyomavirus SV 40

**Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (TP2&4) et dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).**

**Conditionnement:** Sachet de 50 lingettes 18 x 20 cm

**Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Nom du produit:** WIP'ANIOS EXCEL

**Utilisation et instructions:** Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. **Onglet "Documentation"**

**Fabricant:** Laboratoires ANIOS

**Marquage CE:** Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830