

Aniospray Surf 29 - Désinfectant à pulvériser - 3 Bidons de 1 litre + pulvérisateur



Aniospray Surf 29 est un désinfectant rapide **prêt à l'emploi** qui peut être utilisé en bloc opératoire, dans les services à hauts riques, en salle d'examen, en services de soins. **Désinfection des surfaces et des dispositifs médifcaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés** (stéthoscopes, câbles et connectiques, testeurs de glycémie ...). **Usage réservé aux professionnels*.**

Référence 556052 X 3 + 556053

Attributs du produit :

Description du produit:

*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.

Les atouts et caractéristiques de Aniospray Surf 29 - Désinfevtant à pulvériser - 3 Bidons de 1 litre + pulvérisateur

- Formulé sans aldéhyde, sans colorant ni substance parfumante
- Large spectre antimicrobien (B.K., HIV-1, HBV et Rotavirus)
- Large compatibilité avec tou type de matériaux et dispositifs médicaux
- Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation Référencé dans la Liste positive S.F.H.H.
- Produit prêt à l'empoi. Solution limpide incolore.
- pH à +20°C : env. 5,5. Pourcentage d'éthanol : 29% v/v. Point d'éclair : +33°C.
- Produit testé selon APAVE. Utilisable dans les pulvérisations manuels ou à pression préalable.

Propriétés microbiologiques de Aniospray Surf 29 - Désinfevtant à pulvériser - 3 Bidons de 1 litre + pulvérisateur

- Actif sur Bactéries: EN 1040, EN 1276 SARM (EN 13727) NF T 72-171 5 minutes
- Actif sur Mycobactéries: M. tuberculosis (B.K.) 5 minutes
- Actif sur Levures: EN 1275 (C.albicans) 5 minutes
- Actif sur Moisissures: T 72-301 (A. niger, A. fumigatus) 15 minutes
- Actif sur Virus: HIV-1, HBV, BVDV (virus-modèle HCV) Influenzavirus (HN, HN) Rotavirus 15 minutes

Mode d'emploi de Aniospray Surf 29 - Désinfevtant à pulvériser - 3 Bidons de 1 litre + pulvérisateur - Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type SURFANIOS. - Pulvériser un film uniforme sur es surfaces verticales puis le mobilier, du fond de la pièce, jusqu'à la sortie - Laisser la pièce fermée (porte et fenêtres) pendant 15 minutes minimum il est préférable d'attendre 30 minutes et d'aérer si possible avant réutilisation).



Inflammable - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 9/45/CE et ses adaptations) Stockage entre +5°C et +25°C. Usage réservé aux professionnels.

Conditionnement: 3 Flacons de 1 litre livrés avec pulvérisateurs. Normes - Classification - Mentions obligatoires Nom du produit: ANIOSPRAY SURF 29 Utilisation et instructions: Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet "Documentation" Fabricant: Laboratoires ANIOS Marquage CE: Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830