

Civière de relevage polyéthylène - Charge maximum 180 Kg - 3 sangles de maintien en 2 parties



Cette civière de relevage facilite le relevage et le transfert de patients sans mobilisation. **Charge maximum de 180 Kg**, elle est fabriquée en polyéthylène haute densité. Pratique grâce à son **dispositif central d'écartement**, la longueur de la civière s'ajuste également à la taille du patient et la partie du côté des pieds se rabat et permet un gain de place. **Livrée avec 3 sangles de maintien 130 cm en 2 parties avec boucles à déverrouillage rapide.**

Référence 112015

Attributs du produit :

Description du produit :

Atouts et caractéristiques de la Civière de relevage polyéthylène - Charge maximum 180 Kg - 3 sangles de maintien en 2 parties

- Munie d'un dispositif d'écartement central longitudinal permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à bouger le patient.
- Simple d'utilisation, permet une intervention rapide. Radiotransparent, facile à nettoyer.
- Emplacement de tête ergonomique permettant de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale de la victime.
- Elle est notamment destinée aux personnels d'urgence de type **pompiers ou ambulanciers**.
- Civière radio transparente aux rayons X et CT-scan.
- 10 poignées : 6 poignées latérales et 4 poignées situées aux extrémités. Charnières invisibles permettant le pliage avant rangement.
- La longueur s'ajuste en 4 positions de 164,6 cm à 200 cm.
- Dimensions: (L x l x h) Dépliée : 165 x 44,6 x 6,5 cm / Pliée : 120 x 44,7 x 8,5 cm - Longueur ajustable de 165 à 200 cm
- Matière: Polyéthylène haute densité. Poids: 8.4 kg
- Couleur: jaune. Charge maximale admissible: 180 kg
- **Livré avec 3 sangles de maintien 130 cm en 2 parties avec boucles à déverrouillage rapide et Notice**

Instructions d'utilisation et entretien de la Civière de relevage polyéthylène - Charge maximum 180 Kg - 3 sangles de maintien en 2 parties

- Ouvrir la civière, pousser les 2 boutons vers l'extérieur. Ajuster la longueur de la civière à la taille du patient et verrouiller les boutons de réglage.

- Poser la civière à plat, dégager les boucles et les sangles, déverrouiller les extrémités. Glisser la civière sous le patient, verrouiller les extrémités, ajuster les sangles. - Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre.

- Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet.. Ne pas utiliser de produit à base d'iode ou acides et basiques.

Garantie: 2 ans

Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: Civière de relevage polyéthylène

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation. Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Fabricant / Distributeur:** DUMONT SECURITE

Normes applicables au dispositif médical: Dispositif médical de classe I. Conforme EN1865. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.