

Thermomètre Hypothermique Flexible Digital (28 - 42,9°C) - Avec étui



Ce thermomètre hypothermique (Plage de mesure de 28.0°C à 42.9°C) est livré avec son étui. Thermomètre médical électronique, forme arrondie, embout flexible, mesure ultra rapide, bip sonore, étanche, incassable, polyvalence des sites (rectal, buccal, axillaire, inguinal), mémoire, **étendue de mesure 28°C à 43,9 °C**, pile longue durée, arrêt automatique, sous étui plastique avec notice intérieure.

Référence 661068

Attributs du produit :

Description du produit :

Spécifications techniques du Thermomètre Hypothermique Flexible Digital (28 - 42,9°C) - Avec étui

- ÉTENDUE DE MESURE EN 12470-3 28,0 °C à 42,9 °C 32,0 °C à 42,9 °C
- INCRÉMENT NUMÉRIQUE EN 12470-3 0,1 °C
- ERREUR MAXIMALE TOLÉRÉE (EMT) EN 12470-3 0,1 °C entre 34 °C et 42 °C (5 points de mesure contrôlés)
- TEMPS DE RÉPONSE, DISSIPATION MAXIMALE D'ÉNERGIE, STABILITÉ À LONG TERME EN 12470-3 Conformité 0,01 °C
- PLAGE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT, EFFET DE STOCKAGE, CHOC THERMIQUE, HUMIDITÉ, CHOC MÉCANIQUE, RÉSISTANCE À L'EAU, INDICATION DE LA LIMITE DE TENSION, DISPOSITIF INDICATEUR, ESSAI DE SÉCURITÉ EN 12470-3 Conforme FONCTIONNELLE, MATÉRIAU, SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE, SÉCURITÉ MÉCANIQUE - COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE EN 12470-3 Conforme EN 60601-1-2 DURÉE DE GARANTIE 2 ans

Utilisation et mode d'emploi du Thermomètre hypothermique digital

Ils fonctionnent par mesurage d'une température maximale après qu'un état d'équilibre ait été atteint, et l'indicateur traite alors le signal de sortie pour afficher la valeur de la température mesurée.

- MISE EN MARCHÉ > Appuyer 1 fois sur la touche Marche/Arrêt.
- PRISE DE TEMPÉRATURE > Polyvalence des sites : (rectal, buccal, axillaire, inguinal).
- LECTURE > Plusieurs bips sonores signalent la fin de la mesure et le C° cesse de clignoter.
- CONSULTATION DE LA MÉMOIRE > Appuyer sur la touche Marche/Arrêt sans la relâcher.

Garantie: 2 ans Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: Thermomètre médical électronique DIGIFLEX **Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle avant utilisation - **Onglet documentation** - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Fabricant:** THERMOFINA **Normes applicables au dispositif médical:** Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux