

Contention sécurisée pour Lit Salvafix Standard



Ces dispositifs de contention ont été spécialement conçus pour **restreindre la liberté de mouvement des personnes aux facultés psychiatriques altérées**, pour **prévenir et éviter le risque de chute** et limiter les périodes de déambulation ou permettre l'administration d'un soin. **Lire attentivement les recommandations. Usage réservé aux professionnels de santé***.

Référence 257070

Description du produit :

**Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

Réf 257070: Les bracelets SALVAFIX permettent de fixer les mains du patient au lit. Ils sont fixés à la structure du lit par une longue bande ajustable.

1. Le système Controlled Mobility System fonctionne en combinaison avec la ceinture abdominale en passant la bande de bracelet à travers le passant inférieur de la ceinture, limitant ainsi les mouvements en dehors du lit.
2. L'intérieur des bracelets est rembourré et doux au toucher, permettant de prévenir les plaies de pression et les éraflures.
3. Les bracelets comportent une zone équipée de Velcro®, qui permet de les installer plus rapidement et plus fermement, renforçant ainsi la sécurité du système.

Réf 257072: Les bandes chevilles SALVAFIX permettent de fixer les pieds du patient au lit. L'ensemble est composé d'une sangle qui se fixe à la structure du lit et de deux bandes chevilles indépendantes qui sont fixées au lit à l'aide de verrous.

1. Le système de mobilité contrôlée intégré dans les bandes cheville permet de régler le niveau de retenue selon les besoins cliniques du patient.
2. L'intérieur des bandes cheville est rembourré et doux au toucher, permettant de prévenir les plaies de pression et les éraflures.
3. Les bandes cheville comportent une zone équipée de Velcro®, qui permet de les installer plus rapidement et plus fermement, renforçant ainsi la sécurité du système.

Réf 257074: La ceinture de retenue abdominale SALVAFIX inclue un système articulé qui permet au patient de se retourner d'un côté comme de l'autre, d'être installé ou de s'asseoir sur le lit.

1. L'installation dans le lit est simple.
2. Les bandes latérales empêchent le patient de se retourner dans le lit.
3. La bande périnéale ou la pince fémorale empêche le patient de se tourner dans la ceinture et évite tout risque de suffocation en se glissant vers le bas.

Réf 257076: Harnais avec bande thoracique qui empêche le patient de glisser vers le haut et son installation est très flexible.

1. Une bande autour du thorax permet d'éviter les glissements et le relâchement du harnais.
2. Ce produit inclut une sangle transversale qui permet d'arrêter un mouvement violent ou soudain afin d'éviter que le patient ne se blesse ou ne blesse autrui.
3. Pour les patients non violents, ce harnais peut être utilisé sans la sangle transversale, laissant ainsi plus de mobilité au patient, qui pourra s'asseoir sur le lit sans risque de glisser.

Réf 257078: Jeu complet (4 références) + Sac de transport

Recommandations pour l'utilisation des éléments de contention Salvafix

1. Utiliser toujours le produit dont la taille correspond au patient
2. Vérifier TOUT le système AVANT de l'utiliser
3. Fixer solidement TOUTES les bandes de Salvafix au châssis du lit
4. Appliquer toujours les 2 bandes latérales de la ceinture Salvafix ainsi que la sangle périnéale
5. Maintenir, si besoin, les deux barrières latérales du lit levées en fonction de la prescription
6. Surveiller constamment les patients équipés par Salvafix et réévaluer la contention
7. Suivre les instructions du Protocole de maintien de votre Etablissement
8. NE PAS UTILISER Salvafix si vous n'avez pas reçu la formation et l'entraînement nécessaires
9. NE PAS UTILISER Salvafix avant d'avoir lu TOUTES les recommandations de sécurité
10. Avoir toujours sous la main un élément tranchant rapide et sûr à utiliser en cas d'urgence
11. Chez les patients qui ont un pacemaker, ne pas approcher la clé à moins de 15cm
12. Toujours respecter la prescription médicale

Garantie: 1 An

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: SALVAFIX SYSTEME DE CONTENTION AVEC FERMETURE MAGNETIQUE

Utilisation et instructions: Lire les recommandations avant utilisation. NE PAS UTILISER les produits Salvafix si vous ne respectez pas TOUTES les recommandations. Une mauvaise utilisation des systèmes de maintien Salvafix peut provoquer des blessures graves et entraîner la mort par étranglement ou asphyxie abdominale

Fabricant - Distributeur: MEDICARE SYSTEM - MEDISPORT

Classe du dispositif médical: Dispositif médical de classe I, non stérile

Normes applicables au dispositif médical: Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux



