

Pansement compressif d'urgence type israélien



Ce bandage compressif stérile d'urgence est facile d'utilisation. Il est **destiné aux soins de premiers secours afin de stopper tout saignement rapide. Compresse stérile et barre de pression** afin de contrôler le saignement. **Compresse n'adhérant pas à la plaie. Pas d'équipement supplémentaire nécessaire.** Emballage sous vide, usage unique. **Dimensions: 10 x 20 cm x 3,5 mètres.** Applicable sur toutes personnes et sur différentes parties du corps afin de contrôler le saignement et permet de panser les blessures et les écorchures.

Référence 442540

Attributs du produit :

Description du produit :

Caractéristiques du Bandage compressif d'urgence type israélien

- Applicable sur toutes personnes et sur différentes parties du corps afin de contrôler le saignement et permet de panser les blessures et les écorchures.
- Compresse n'adhérant pas à la plaie.
- Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire.
- Utiliser la barre de pression afin de contrôler le saignement en tant que première mesure.
- Possibilité de créer un effet garrot lorsque la bande est serrée fortement.
- Emballage sous vide, usage unique.
- Dimensions : 10 x 20 cm x 3,5 mètres.

Mode d'emploi du Bandage compressif d'urgence type israélien

- 1- Placez la compresse sur la blessure et enroulez le bandage autour de la partie blessée
- 2- Insérez le bandage élastique dans l'applicateur de pression
- 3- Serrez puis....
- 4- continuez en sens inverse de façon à ce que l'applicateur de pression appuie bien sur la compresse
- 5- Enroulez le bandage autour de l'applicateur de pression en serrant bien et en veillant à bien couvrir l'intégralité de la compresse
- 6- Fixez le bout en insérant l'extrémité de retenue entre les couches de bandage

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Bandage compressif d'urgence type israélien

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant / Distributeur: SUNGO / CIR MEDICAL

Normes applicables au dispositif médical: Dispositif de classe I. Ce dispositif médical est un produit de santé

réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes.