


Aniospray QUICK - Bidon de 5 litres - Désinfectant à pulvériser

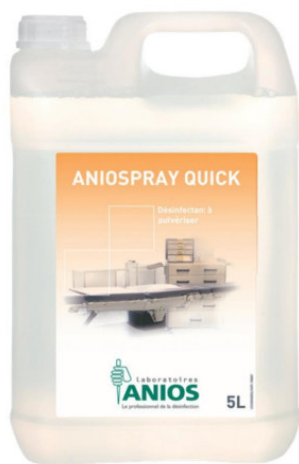

Prêt à l'emploi, Aniospray Quick est un désinfectant rapide, temps de séchage 30s. Utilisable en bloc opératoire, dans les services à hauts risques, en services de soins ou en ambulance. **Actif sur virus et bactéries. Désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs**, préalablement nettoyés (stéthoscopes, etc...).

Usage réservé aux professionnels. Produit soumis à formation au Certificat individuel pour utiliser à titre professionnel et distribuer certains types de produits biocides catégorie désinfectants*.

Référence 556070

Attributs du produit :

Description du produit :

****Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.***

Les atouts de Aniospray Quick - Bidon de 5 litres

- Solution prête à l'emploi • Sur base éthanol
- Large spectre d'activité en temps court • Ne laisse pas de trace au séchage
- Odeur agréable • Formulation sans aldéhyde, sans colorant

Propriétés microbiologiques de Aniospray Quick - Bidon de 5 litres

- **Actif sur Bactéries:** EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. SARM (EN 14561): 30 secondes

- **Actif sur Mycobactéries:** Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563: 30 secondes

Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563: 5 minutes

- **Actif sur Levures / Moisissures:** Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, En 13697. Tricophyton mentagrophytes : EN 14562: 30 secondes

Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562, En 13697: 5 minutes

- **Actif sur Virus:** Adenovirus, HIV-1, PRV (surrogate of HBV), BVDV (surrogate of HCV), Vaccinia virus* Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H1 N1) : 30 secondes

Calicivirus Felin, Norovirus MNV: 5 minutes

Mode d'emploi de Aniospray Quick - Bidon de 5 litres

A utiliser avec un pulvérisateur manuel ANIOS

- Nettoyer préalablement les surfaces et les dispositifs médicaux à l'aide d'un détergent désinfectant ANIOS.
- Pulvériser sur les zones à traiter jusqu'à ce qu'elles soient totalement humectées. Appliquer en quantité suffisante (+/- 40 ml/m²).

- Temps de contact de 30 secondes minimum. Le rinçage est inutile sauf si la surface ou le dispositif médical est destiné à être en contact avec la peau ou les muqueuses

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : +5°C à +25°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2) et des dispositifs médicaux de classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée) - Usage réservé aux professionnels.

Conditionnement: le bidon de 5 litres **Normes - Classification - Mentions obligatoires Nom du produit:** ANIOSPRAY QUICK **Utilisation et instructions:** Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. **Onglet "Documentation" Fabricant:** Laboratoires ANIOS **Marquage CE:** Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830