

Aspirateur de mucosités électrique New Askir 118 Basic



Cet aspirateur de mucosités médical peut être utilisé chez l'enfant ou l'adulte pour l'aspiration nasale et trachéale des liquides organiques. **Batterie rechargeable, débit d'aspiration: 36 l / Mn. Livré avec sa housse de transport**, son câble 12V et son câble secteur. Ce dispositif a été spécifiquement conçu pour une utilisation en Ambulance. **Usage réservé à un personnel qualifié.**

Référence 365025

Description du produit :

Utilisation de l'aspirateur de mucosités électrique New Askir 118 Basic

- Dispositif spécifiquement conçu pour une utilisation en ambulance.
- NEW ASKIR 118 BASIC est un dispositif médical électrique pour l'aspiration nasale, orale et trachéale des fluides corporels chez l'enfant ou l'adulte.
- Batterie rechargeable, autonomie 70 mn, niveau sonore faible en fonctionnement.
- Livré complet avec **sacoche de transport, cordon d'alimentation, adaptateur 12V, adaptateur universel AC/DC, vase de récolte, tuyaux silicone, connecteur et canule.**

Mode d'emploi de l'aspirateur de mucosités électrique New Askir 118 Basic

- **Usage réservé à un personnel qualifié.**
- Le dispositif doit être contrôlé avant toute utilisation, afin de pouvoir détecter les anomalies de fonctionnement et/ou dommages dus au transport et/ou stockage.
- La position de travail doit permettre d'atteindre la console de commandes et d'avoir une bonne vision de l'indicateur du vide, du vase et du filtre antibactérien.

- Il est conseillé de ne pas tenir dans la main le dispositif et/ou d'éviter des contacts prolongés de l'appareil avec le corps.

ATTENTION: Pour une utilisation correcte, positionner l'aspirateur sur une surface plane et stable, afin d'avoir le volume total d'utilisation du vase et la meilleure efficacité du dispositif de trop-plein. **Caractéristiques techniques de l'aspirateur de mucosités électrique New Askir 118 Basic**

- Dimensions: 350 x 150 x 190
- Poids: 2.5 Kg
- Débit d'aspiration maximum: 36l/Mn
- Pompe à piston sans huile ni entretien

Garantie: 2 Ans Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: NEW ASKIR 118 BASIC Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation: Onglet "Documentation". L'utilisation est réservée à un personnel qualifié



(Médecin/Chirurgien, Infirmière professionnelle/Assistante. Ne jamais ouvrir l'appareil. Pour toute intervention, contacter le service technique. **Fabricant:** CA-MI **Classe du dispositif médical:** IIa **Normes applicables au dispositif médical:** Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux