

Aspirateur de mucosités électrique New Askir 118 Basic



Cet aspirateur de mucosités médical peut être utilisé chez l'enfant ou l'adulte pour l'aspiration nasale et trachéale des liquides organiques. Batterie rechargeable, débit d'aspiration: 36 I / Mn. Livré avec sa housse de transport, son câble 12V et son câble secteur. Ce dispositif a été spécifiquement conçu pour une utilisation en Ambulance. Usage réservé à un personnel qualifié.

Référence 365025

Attributs du produit :

Description du produit:

Utilisation de l'aspirateur de mucosités électrique New Askir 118 Basic

- Dispositif spécifiquement conçu pour une utilisation en ambulance.
- NEW ASKIR 118 BASIC est un dispositif médical électrique pour l'aspiration nasale, orale et trachéale des fluides corporels chez l'enfant ou l'adulte.
- Batterie rechargeable, autonomie 70 mn, niveau sonore faible en fonctionnement.
- Livré complet avec sacoche de transport, cordon d'alimentation, adaptateur 12V, adaptateur universel AC/DC, vase de récolte, tuyaux silicone, connecteur et canule.

Mode d'emploi de l'apirateur de mucosités électrique New Askir 118 Basic

- Usage reservé à un personnel qualifié.
- Le dispositif doit être contrôlé avant toute utilisation, afin de pouvoir détecter les anomalies de fonctionnement et/ou dommages dus au transport et/ou stockage.
- La position de travail doit permettre d'atteindre la console de commandes et d'avoir une bonne vision de l'indicateur du vide, du vase et du filtre antibactérien.
- Il est conseillé de ne pas tenir dans la main le dispositif et/ou d'éviter des contacts prolongés de l'appareil avec le corps.

ATTENTION: Pour une utilisation correcte, positionner l'aspirateur sur une surface plane et stable, afin d'avoir le volume total d'utilisation du vase et la meilleure efficacité du dispositif de trop-plein. Caratéristiques techniques de l'aspirateur de mucosités électrique New Askir 118 Basic

- Dimensions: 350 x 150 x 190
- Poids: 2.5 Kg
- Débit d'aspiration maximum: 36l/Mn
- Pompe à piston sans huile ni entretien

Garantie: 2 Ans Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: NEW ASKIR 118 BASIC Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation: Onglet "Documentation". L'utilisation est réservée à un personnel qualifié (Médecin/Chirurgien, Infirmière professionnelle/Assistante. Ne jamais ouvrir l'appareil. Pour toute intervention, contacter le service technique. Fabricant: CA-MI Classe du dispositif médical: Ila Normes



applicables au dispositif médical: Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux