

Détergent désinfectant surfaces et dispositifs médicaux STERICID MEDSPRAY - Spray de 750 ml



Spray idéal pour la **désinfection et le nettoyage des surfaces dures non poreuses** en milieu médical, dans les collectivités ou lieux accueillant du public et des **Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...)**. Produit actif sur Virus EN14476. ***Produit destiné aux professionnels.**

Référence 553051

Attributs du produit :

Description du produit :

****Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.***

Formule du détergent désinfectant STERICID MEDSPRAY - Spray de 750 ml

- Sans parfum
- Actif : Chlorure de Didécylidiméthylammonium (n° CAS 7173-51-5 : 0.29%).

Propriétés microbiologiques du détergent désinfectant STERICID MEDSPRAY - Spray de 750 ml

A 20°C:

- Bactéricide EEN1276*, EN13727**, EN13697** EN 5 MN
- Levuricide EN1650*, EN13624**, EN13697** en 5 min.
- Actif sur Virus EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus. EN16777** sur Vaccina, Norovirus, Adenovirus

*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton, ** 3g/L albumine bovine

Mode d'emploi du détergent désinfectant STERICID MEDSPRAY - Spray de 750 ml

- Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface.
- Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m² soit 22 pulvérisations).
- Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact avec les denrées alimentaires).

Conditionnement: Spray de 750 ml **Normes - Classification - Mentions obligatoires**

Nom du produit: STERICID MEDSPRAY

Utilisation et instructions: Lire la fiche technique et fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet "Documentation"

Fabricant: STERIDIS