

# Masques de protection FFP2 Norme EN149:2001 + A1:2009 - Boite de 50 masques



**Filtration de 95% des particules contenues dans l'air** pour ces masques FFP2 qui sont des masques de protection respiratoire. Equipement de protection individuelle (EPI), **ces masques FFP2 ne sont pas à usage médical.** Norme 149:2001 + A12009. Marquage CE suivant le règlement 2016/425.

Référence 711024F

## Attributs du produit :

### Description du produit :

#### Les atouts des Masques de protection FFP2 Norme EN149:2001 + A1:2009 - Boite de 50 masques

- Il permet de protéger la personne qui le porte contre l'inhalation d'agents infectieux, gouttelettes et particules en suspension dans l'air et protège également l'entourage des projections émises par le porteur.
- Polypropylène non tissé - Couleur blanche. - Barrette nasale acier
- Entre 4 et 6 heures de protection
- Filtration de 95% des particules contenues dans l'air.
- Adapté à la morphologie du visage - Couverture optimale
- Très bon confort respiratoire.
- Dispositif non médical

#### Utilisation des Masques de protection FFP2 Norme EN149:2001 - Boite de 50 masques

IMPORTANT: Le port du masque sur la bouche et le nez, prévient l'inhalation de poussière. Se laver correctement les mains (20 secondes au minimum) avant utilisation

1) Positionnez le masque sans pincer le nez, placez le clip vers le haut, maintenez le masque sur votre visage, celui ci doit couvrir le nez jusqu'au menton.

2-3) Placez les élastiques derrière les oreilles.

4) Ajustez la barrette nasale avec les deux mains.

5) Mettez vos mains sur votre visage pour vérifier l'étanchéité du masque

Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains. A jeter à la poubelle après utilisation.

Conditionnement: le boite de 50 masques