

Lingettes désinfectantes épaisses STERICID MEDWIPES - Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm



Ces lingettes de **18 x 20 cm épaisses** sont prévues pour les **surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...)** ainsi que surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...). **Produit destiné aux professionnels ET grand public.**

Référence 553071

Attributs du produit :

Description du produit :

Formule des Lingettes désinfectantes épaisses STERICID MEDWIPES - Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm

- Actif: Chlorure de Didécyl diméthyl ammonium (n° CAS: 7173-51-5 : 0.29%).

Propriétés microbiologiques des Lingettes désinfectantes épaisses STERICID MEDWIPES - Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.

- Levuricide EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN16615** en 5 min.

- Actif sur Virus EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus

Mode d'emploi des Lingettes désinfectantes épaisses STERICID MEDWIPES - Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm

- Produit prêt à l'emploi à usage unique. Soulever le couvercle et retirer l'étiquette autocollante. Sortir une lingette du paquet. Passer 3 lingettes par m² de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer

Conditionnement: le sachet de 100 lingettes épaisses

Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact avec les denrées alimentaires). Usage réservé aux professionnels

Normes - Classification - Mentions obligatoires Nom du produit: LINGETTES NETTOYANTES

DÉSINFECTANTES POUR SURFACES, PETIT MATÉRIEL, DISPOSITIFS MEDICAUX MEDWIPES **Utilisation et instructions:** Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. **Onglet "Documentation"**
Fabricant: STERIDIS **Marquage CE:** conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878