

## Lingettes désinfectantes épaisses STERICID MEDWIPES - Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm



Ces lingettes de **18 x 20 cm épaisses** sont prévues pour les **surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...)** ainsi que surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...). **Produit destiné aux professionnels\***.

Référence 553071

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

*\*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

#### Formule des Lingettes désinfectantes épaisses STERICID MEDWIPES - Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm

- Actif: Chlorure de Didécyl diméthyl ammonium (n° CAS: 7173-51-5 : 0.29%).

#### Propriétés microbiologiques des Lingettes désinfectantes épaisses STERICID MEDWIPES - Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm

En conditions de saleté (sauf \*)

- Bactéricide EN1276\*, EN13727, EN13697\*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.

- Levuricide EN1650\*, EN13624\*\*, EN13697\*\*, EN16615\*\* en 5 min.

- Actif sur Virus EN14476\*\* sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus

#### Mode d'emploi des Lingettes désinfectantes épaisses STERICID MEDWIPES - Sachet de 100 lingettes 18 x 20 cm

- Produit prêt à l'emploi à usage unique. Soulever le couvercle et retirer l'étiquette autocollante. Sortir une lingette du paquet. Passer 3 lingettes par m<sup>2</sup> de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer

**Conditionnement:** le sachet de 100 lingettes épaisses

**Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact avec les denrées alimentaires). Usage réservé aux professionnels**

**Normes - Classification - Mentions obligatoires Nom du produit:** LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES POUR SURFACES, PETIT MATÉRIEL, DISPOSITIFS MEDICAUX MEDWIPES **Utilisation et instructions:** Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. **Onglet "Documentation"**  
**Fabricant:** STERIDIS **Marquage CE:** conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878