

Station Lave oeil Plum 0.9% Chlorure de Sodium - Corps étranger



Cette station est idéale en situation d'urgence, le flacon s'ouvre d'un seul geste par rotation de l'ocillère ergonomique. Composée d'un **flacon de 500 ml de solution saline et d'un support avec pictogramme et miroir**. Le montage est facile grâce aux vis et chevilles fournies.

Référence 557572

Description du produit :

Principales caractéristiques de la Station Lave oeil Plum 0.9% Chlorure de Sodium - Corps étranger

- Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % : similaire aux sécrétions de l'œil humain
- Lave-œil efficace pour rincer les corps étrangers tels que les impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants
- Utilisation facile
- Ocellères ergonomiques qui assurent un flux de liquide efficace
- Design pratique pour une ouverture rapide et simple des flacons
- Les flacons sont à usage unique et ne peuvent pas être réutilisés
- Les flacons portent le marquage CE et ont une durée de conservation de 3,5 ans

Utilisation de la Station Lave oeil Plum 0.9% Chlorure de Sodium - Corps étranger

- Dévisser l'ocillère jusqu'à casser l'opercule.
- Tête en arrière, vous pouvez rincer.
- Une fois rincé et pour éviter de vous mouiller, vous pouvez pencher la tête en avant.

Conditionnement: Flacon de 500 ml + Support mural avec pictogrammes et miroir

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Lave oeil Plum 0.9% Chlorure de Sodium - Corps étranger - Station Flacon de 500 ml

Fabricant: Plum

Utilisation et instructions: Lire mode d'emploi avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Normes applicables au dispositif médical: Dispositif médical de classe I. Produit de santé réglementé qui porte à ce titre le marquage CE.

