

## Détergent et désinfectant Medfill surfaces et dispositifs médicaux - Bidon de 5 litres



Nettoyage et désinfection sans alcool et sans parfum des surfaces dures non poreuses en **milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public** (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...). **Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...)**. Compatible pour les surfaces sensibles. Bactéricide, virucide et levuricide. Prêt à l'emploi. **Produit destiné aux professionnels\***.

Référence 553081

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

***\*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.***  
**Propriétés microbiologiques du Détergent et désinfectant Medfill surfaces et dispositifs médicaux - Bidon de 5 litres**

- Bactéricide : EN1276\*, EN13727\*\*, EN13697\*\* en 5 min.
- Levuricide : EN1650\*, EN13624\*\*, EN13697\*\* en 5 min.
- **Actif sur virus**: EN14476\*: Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Noravirus en 5mn. EN16777\*: Vaccinia, Noravirus, Adenovirus

\*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton.

\*\*3g/L albumine bovine.

#### Mode d'emploi du Détergent et désinfectant Medfill surfaces et dispositifs médicaux - Bidon de 5 litres

Répartir généreusement le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface. Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m<sup>2</sup> soit 22 pulvérisations). Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

**Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact avec les denrées alimentaires).**

#### Normes - Classification - Mentions obligatoires

**Désignation:** STERICID MEDFILL

**Utilisation et instructions:** Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet

**"Documentation"**

**Marque: STERIDIS**