

## Détergent et désinfectant Medfill surfaces et dispositifs médicaux -Bidon de 5 litres



Nettoyage et désinfection sans alcool et sans parfum des surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...). Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...). Compatible pour les surfaces sensibles. Bactéricide, virucide et levuricide. Prêt à l'emploi. Produit destiné aux professionnels\*.

Référence 553081

## Attributs du produit :

## **Description du produit:**

\*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée. Propriétés microbiologiques du Détergent et désinfectant Medfill surfaces et dispositifs médicaux - Bidon de 5 litres

- Bactéricide : EN1276\*, EN13727\*\*, EN13697\*\* en 5 min.
- Levuricide : EN1650\*, EN13624\*\*, EN13697\*\* en 5 min.
- Actif sur virus: EN14476\*: Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Noravirus en 5mn. ENI6777\*: Vaccinia, Noravirus, Adenovirus

Mode d'emploi du Détergent et désinfectant Medfill surfaces et dispositifs médicaux - Bidon de 5 litres Répartir généreusement le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complétement la surface. Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m² soit 22 pulvérisations). Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact avec les denrées alimentaires).

Normes - Classification - Mentions obligatoires

**Désignation: STERICID MEDFILL** 

Utilisation et instructions: Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet

<sup>\*3</sup>g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton.

<sup>\*\*3</sup>g/L albumine bovine.



"Documentation"
Marque: STERIDIS