

## Ceinture de contention de sécurité périnéale au lit Salvafix



Cette ceinture permet **la mise sous contention du patient agité. La sangle périnéale empêche le glissement au fond du lit.** Les sangles latérales permettent de contrôler et de déterminer la latéralisation du patient d'un ou des deux côtés en même temps. Les repères alphanumériques permettent de mémoriser l'emplacement des fermetures pour chaque patient et ainsi facilitent les mises en place à chaque application. **Lire attentivement les recommandations. Usage réservé aux professionnels de santé\*.**

Référence 257074

### Attributs du produit :

Options: Ceinture périnéale Taille L - Tour de Taille: 95 - 135 cm - 3 boutons et 1 clé ,  
Ceinture périnéale Taille S - Tour de Taille: 46 - 76 cm - 3 boutons et 1 clé , Ceinture périnéale Taille M - Tour de Taille: 68 - 108 cm - 3 boutons et 1 clé

### Description du produit :

*\*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

#### Mise en place de Ceinture périnéale au lit Salvafix

Déplier la ceinture, la positionner en veillant à se qu'elle soit plaquée et centrée sur le matelas ; les petits passants en direction des pieds du lit

Venir fixer fermement la ceinture à l'aide des 2 brides extérieures sur les parties rigides du cadre du lit en ayant au préalable positionné une tige de chaque côté dans les œillets prévus à cet effet (dans les lits articulés privilégier les parties mobiles

Fermer sur la taille du patient en ajustant (laisser seulement le passage d'une main sur l'abdomen)

Toujours fixer les sangles latérales de sécurités sur les tiges extérieures, verrouiller à l'aide des bouchons

Toujours positionner la sangle périnéale sur la fermeture de la ceinture

#### Recommandations pour l'utilisation des éléments de contention Salvafix

1. Utiliser toujours le produit dont la taille correspond au patient
2. Vérifier TOUT le système AVANT de l'utiliser
3. Fixer solidement TOUTES les bandes de Salvafix au châssis du lit
4. Appliquer toujours les 2 bandes latérales de la ceinture Salvafix ainsi que la sangle périnéale
5. Maintenir, si besoin, les deux barrières latérales du lit levées en fonction de la prescription

6. Surveiller constamment les patients équipés par Salvafix et réévaluer la contention
7. Suivre les instructions du Protocole de maintien de votre Etablissement
8. NE PAS UTILISER Salvafix si vous n'avez pas reçu la formation et l'entraînement nécessaires
9. NE PAS UTILISER Salvafix avant d'avoir lu TOUTES les recommandations de sécurité
10. Avoir toujours sous la main un élément tranchant rapide et sûr à utiliser en cas d'urgence
11. Chez les patients qui ont un pacemaker, ne pas approcher la clé à moins de 15cm
12. Toujours respecter la prescription médicale

**Précautions:** Veiller à toujours utiliser la taille adaptée à la morphologie du patient. Ne pas utiliser sur matelas à air

**Garantie:** 1 An

**Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Désignation:** SALVAFIX SYSTEME DE CONTENTION AVEC FERMETURE MAGNETIQUE

**Utilisation et instructions:** Lire les recommandations avant utilisation. NE PAS UTILISER les produits Salvafix si vous ne respectez pas TOUTES les recommandations. Une mauvaise utilisation des systèmes de maintien Salvafix peut provoquer des blessures graves et entraîner la mort par étranglement ou asphyxie abdominale

**Fabricant - Distributeur:** MEDICARE SYSTEM - MEDISPORT

**Classe du dispositif médical:** Dispositif médical de classe I, non stérile

Normes applicables au dispositif médical: Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux