

Flacon Lave-Œil - Solution de Lavage Oculaire Stérile (Chlorure de Sodium 0,9%)



Le flacon lave-œil contient une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, idéale pour le lavage oculaire d'urgence. Ce produit est conçu pour nettoyer et apaiser les yeux en cas de contact avec des substances irritantes, des poussières ou des corps étrangers. Il offre une solution rapide et pratique pour nettoyer l'œil en toute sécurité.

- Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9%
- Facilité d'utilisation : Le flacon est prêt à l'emploi. Il suffit de placer le bouchon sur le flacon, de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour rompre la protection.
- Pratique et hygiénique : Flacon hermétique qui assure la stérilité de la solution jusqu'à son utilisation.
- Sécuritaire : Formats conçus pour un usage en cas d'urgence, pour un lavage rapide et efficace des yeux.
- Trois formats disponibles: 500 ml, 250 ml, 100 ml.

Référence 55757

Attributs du produit :

Options: Flacon de 100 ml, Flacon de 250 ml, Flacon de 500 ml

Description du produit:

Utilisation:

- Retirer le bouchon du flacon.
- Placer le flacon au-dessus de l'œil concerné.
- Presser doucement pour faire couler la solution saline dans l'œil et éliminer les impuretés.
- Répéter l'opération si nécessaire.

Formats disponibles:

- 500 ml Grande capacité, idéal pour les environnements professionnels ou médicaux.
- 250 ml Taille intermédiaire pour une utilisation régulière à domicile.
- 100 ml Format pratique et compact pour emporter avec soi en cas d'urgence.

Avantages:

- Solution saline parfaitement adaptée pour un lavage oculaire en toute sécurité.
- Produit à usage unique pour éviter tout risque de contamination croisée.
- Pratique à emporter en voyage, dans le sac à dos, ou pour un usage en entreprise (ateliers, laboratoires, etc.).



- Idéal pour les premières interventions lors de blessures oculaires mineures.

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Nom du produit: Solution stérile pour le lavage des yeux

Utilisation et instructions: Lire attentivement la notice avant utilisation. Demander conseil à votre pharmacien

ou à un professionnel de santé.

Fabricant: PVS FIRST AID

Marquage CE : Dispositif médical de classe IIa. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui