

Flacon Lave-Œil - Solution de Lavage Oculaire Stérile (Chlorure de Sodium 0,9%)



Le flacon lave-œil contient une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, idéale pour le lavage oculaire d'urgence. Ce produit est conçu pour **nettoyer et apaiser les yeux en cas de contact avec des substances irritantes, des poussières ou des corps étrangers**. Il offre une solution rapide et pratique pour nettoyer l'œil en toute sécurité.

- **Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9%**
- Facilité d'utilisation : Le flacon est prêt à l'emploi. Il suffit de placer le bouchon sur le flacon, de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour rompre la protection.
- Pratique et hygiénique : Flacon hermétique qui assure la stérilité de la solution jusqu'à son utilisation.
- Sécuritaire : Formats conçus pour un usage en cas d'urgence, pour un lavage rapide et efficace des yeux.
- **Trois formats disponibles : 500 ml, 250 ml, 100 ml.**

Référence 55757

Description du produit :

Utilisation :

- Retirer le bouchon du flacon.
- Placer le flacon au-dessus de l'œil concerné.
- Presser doucement pour faire couler la solution saline dans l'œil et éliminer les impuretés.
- Répéter l'opération si nécessaire.

Formats disponibles :

- 500 ml – Grande capacité, idéal pour les environnements professionnels ou médicaux.
- 250 ml – Taille intermédiaire pour une utilisation régulière à domicile.
- 100 ml – Format pratique et compact pour emporter avec soi en cas d'urgence.

Avantages :

- Solution saline parfaitement adaptée pour un lavage oculaire en toute sécurité.
- Produit à usage unique pour éviter tout risque de contamination croisée.
- Pratique à emporter en voyage, dans le sac à dos, ou pour un usage en entreprise (ateliers, laboratoires, etc.).



- Idéal pour les premières interventions lors de blessures oculaires mineures.

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Nom du produit: Solution stérile pour le lavage des yeux

Utilisation et instructions: Lire attentivement la notice avant utilisation. Demander conseil à votre pharmacien ou à un professionnel de santé.

Fabricant: PVS FIRST AID

Marquage CE : Dispositif médical de classe IIa. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.