

Pansement adhésif stérile imperméable avec compresse EUROPLAIE FILM - La boîte de 5



Le pansement est composé d'un support transparent (PU/PET) adhésif avec, au centre, une compresse en non-tissé recouverte d'un **film de PE empêchant l'adhérence de la compresse à la plaie, permettant ainsi de changer le pansement sans douleur et de ne pas altérer le processus de cicatrisation.**

Fermé sur les 4 côtés. Peut être utilisé sans risque d'irritation sur peaux fragiles. Facile à décoller. Ne laisse pas de trace sur la peau.

Ce pansement adhésif stérile est idéal pour les plaies post-opératoires. Indiqué en cas de coupures, écorchures, plaies exsudatives superficielles. **Il permet d'absorber le sang ou les exsudats, de traiter et d'atténuer une blessure, et de protéger contre les infections.**

Référence 442515

Attributs du produit :

Options: Boite de 5 pansements - 5 x 7 cm,
Boite de 5 pansements - 9 x 10 cm

Description du produit :

- A usage unique
- Stérile (oxyde d'éthylène)
- Sans latex

Mise en place du DM à l'emplacement souhaité sans toucher la compresse :

- 1- Nettoyer et sécher complètement la zone d'application.
- 2- Sortir le pansement de son emballage.
- 3- Retirer l'élément protecteur 1 et appliquer le pansement.
- 4- Retirer l'élément protecteur 2 pour fixer tout le pansement.
- 5- Retirer l'élément protecteur 3 et lisser les bords du pansement en exerçant une pression suffisante pour une adhésivité optimale.

Conditionnements: Boite de 5 pansements 5 cm x 7cm - Réf 442515. Boite de 5 pansements 10 cm x 9 cm - Réf 442517

Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: PANSEMENTS CHIRURGICAUX EUROPLAIE
Fabricant: Laboratoires EUROMEDIS **Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle avant utilisation -

Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Normes applicables au dispositif médical:** Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.