

## Patch hémostatique chitosan Axiostat® MIL88 – 8 x 8 cm



Le pansement hémostatique Axiostat® Chitosan MIL88 est une **solution hémostatique avancée conçue pour arrêter rapidement les saignements modérés à sévères liés aux blessures traumatiques.**

Grâce à sa technologie brevetée PBT® (Protonated Bioadhesive Technology), ce patch à base de chitosane crée une barrière mécanique active, favorise une hémostase rapide et réduit significativement la perte de sang.

Idéal pour les situations d'urgence, il est particulièrement adapté aux premiers secours, aux interventions tactiques et aux kits de traumatologie.

- **Contrôle immédiat des saignements modérés à sévères**
- Action rapide grâce à la technologie PBT®
- Forme une barrière mécanique hémostatique efficace
- Facile à appliquer et à retirer
- **Pansement stérile, usage médical professionnel**
- Format 8 x 8 cm, idéal pour les plaies de grande surface

Référence 445522

### Attributs du produit :

### Description du produit :

#### Indications / Applications

- Blessures par balle
- Blessures par explosion
- Plaies par arme blanche et piqûres profondes
- Coupures du cuir chevelu
- Plaies traumatiques des membres
- Plaies de grande surface ou irrégulières

#### Mode d'emploi

- Ouvrir l'emballage stérile de l'Axiostat®
- Appliquer directement le patch sur la plaie en exerçant une pression ferme
- Ne pas soulever ni retirer le pansement après application
- Maintenir en place à l'aide d'un pansement de maintien ou de terrain
- Pour le retrait, irriguer avec du sérum physiologique ou de l'eau, puis décoller délicatement

#### Utilisateurs recommandés

- Premiers intervenants

- Services de secours et d'urgence
- Forces de l'ordre et unités tactiques
- Personnel médical et paramédical
- Kits de traumatologie, trousse de secours avancées

**Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Désignation / Référence fabricant :** Axiostat Chitosan / MIL88

**Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle avant utilisation - usage médical professionnel.

**Fabricant / Distributeur:** Axio

**Normes applicables au dispositif médical:** Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.