

Mousse détergente désinfectante surfaces et dispositifs médicaux DHP STERICID®



Le spray DHP est une **solution liquide moussante, prête à l'emploi**, classée comme dispositif médical de classe IIb.

Elle est préconisée pour le nettoyage et la désinfection des :

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical
- Surfaces dures non-poreuses des dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non-invasifs (générateurs d'hémodialyses, sondes d'échographie, unit dentaires...).

De plus, le spray DHP répondant aux normes sporicides, il désinfecte ainsi les spores bactériennes (notamment Clostridium difficile), extrêmement résistantes aux conditions environnementales et aux désinfectants classiques.

La formule, sans alcool (à base d'ammonium quaternaires) et sans parfum, lui permet ainsi d'être utilisé, de manière régulière, sur des surfaces pouvant être considérées comme sensibles : cuir, plexiglass..., sans laisser de traces de parfum.

Produit fabriqué en France. Usage réservé aux professionnels*

Référence 553052

Attributs du produit :

Description du produit :

**Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

Caractéristiques techniques

Conditionnement: Spray moussant 750ml

Composition: (substance active biocide) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-,propanoate (salt): 0,21% (CAS: 94667-33-1), agents de surfaces non ioniques, agents séquestrants, excipients.

Parfum: Sans parfum

Langues sur packaging: 100% français

Recyclabilité: Emballage entièrement recyclable (flacon, pompe)

Propriétés microbiologiques: Bactéricide, Levuricide, Virucide, Sporicide, Fongicide, Tuberculocide

Mode d'emploi

1- Pulvériser le produit sur la surface ou le DM à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement

la surface.

2- Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface.

3- Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

Aucun pictogramme de danger.

En cas d'incident, contacter le CAP le plus proche (01.45.42.59.59).

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Utiliser les biocides avec précaution.

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: DHP STERICID

Utilisation et instructions: Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet "Documentation"

Marque: STERIDIS