

## Solution concentrée détergente désinfectante MEDSURF STERICID® - Bidon de 5 litres



La solution MEDSURF est un **concentré liquide, à diluer.**

Elle est préconisée pour le nettoyage et la désinfection des :

- **Surfaces hautes, dures non-poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public** (murs, paillasse, plan de travail poignées de portes, tables, chaises, toilettes...).
- Surfaces dures non-poreuses des dispositifs médicaux non-critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...).

Sols.

- La formule, sans alcool (à base d'ammonium quaternaire), et parfumée à l'eucalyptus permet ainsi au concentré MEDSURF d'être utilisé, de manière régulière, sur des - surfaces pouvant être considérées comme sensibles, tout en laissant une odeur agréable.

Classé comme biocide TP2, mais aussi TP4, le concentré MEDSURF peut être utilisé sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires, à condition d'être rincées ultérieurement.

La solution MEDSURF fait partie de notre gamme STERICID®, dédiée aux produits désinfectants de STERIDIS.

**Produit fabriqué en France.**

Référence 553082

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

##### Caractéristiques techniques:

Conditionnement: Bidon 5L concentré, à diluer

Composition (substance active biocide): Poly(oxy-1,2-ethanediyl)alpha-[2-(didecymethylammonio)ethyl]-omega-hydroxypropanoate (1 :1) (SALT) [CAS : 94667-33-1] : (5,4% m/m)

Parfum: Menthol

Langues sur packaging: 100% français

Recyclabilité: Emballage entièrement recyclable (flacon, bouchon)

Propriétés microbiologiques: Bactéricide, Levuricide, Virucide, Fongicide, Sporicide

##### Mode d'emploi:

Porter des équipements de protection individuels adaptés.

**- Utilisation en milieu médical :**

Diluer 20 ml de MEDSURF pour 8 litres (0,25%) d'eau du réseau  
Homogénéiser la solution.

**- Utilisation en milieu alimentaire, industriel, collectivités :**

80 ml de MEDSURF pour 8 litres (1%) d'eau du réseau  
Homogénéiser la solution (160 ml de MEDSURF pour 8 litres d'eau (2%) pour une activité fongicide.)  
Agiter la solution.

**- Pour le nettoyage du sol :**

Plonger le balai (à franges, démontable, à lavette, à raclette...) dans le seau.  
Nettoyer le sol en faisant un geste de va-et-vient horizontal. Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.

**- Pour le nettoyage des surfaces :**

Imprégner une lingette non-tissée avec la solution.  
Nettoyer la surface en faisant un geste de va-et-vient horizontal.  
Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.

**Ne pas rincer sauf indications contraires du fabricant du revêtement traité ou pour les surfaces en contact avec la peau, les muqueuses les aliments.**

**Produit dangereux**

**Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Désignation:** MEDSURF STERICID

**Utilisation et instructions:** Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet "Documentation"

**Marque:** STERIDIS