

Coussin compressif anti-hémorragie - 10 x 13 cm



Conçu pour remplacer la compression manuelle effectuée par un sauveteur, ce coussin hémostatique type CHUT **permet d'effectuer une compression sur une plaie pour stopper une hémorragie** sans arrêter la circulation sanguine. Dispositif médical à usage unique constitué d'un bande élastique dans laquelle est inséré un bout de mousse. **Libère le sauveteur pour d'autres interventions.**

Référence 445511

Attributs du produit :

Description du produit :

Les atouts, composition et utilisation du Coussin compressif anti-hémorragie - 10 x 13 cm

- Pansement d'urgence compressif constitué d'une bande élastique retournée à l'extrémité, dans laquelle est inséré un carré de mousse
- Il évite plusieurs manipulations et libère le sauveteur pour d'autres interventions
- Dimensions : 10 x 13 cm - Longueur de la bande élastique (étirée): 90 cm
- Composition: **1 coussin en mousse de 10 x 13 cm - 1 bande élastique résistante + velcro - 1 compresse.**
- Utilisation: Après avoir allongé le blessé, appliquer le coussin sur la plaie et maintenir la compression. Enrouler la bande en laissant déborder de chaque côté. Vérifier la sensibilité du pouls et si celui-ci n'est plus sensible en aval de la plaie, adapter l'intensité de la bande jusqu'à une pression suffisante.

Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: COUSSIN ANTI-HEMORRAGIE **Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Normes applicables au dispositif médical:** Dispositif de classe I. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. *Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes.*